

## Novogel™ pads

Absorbierende, sterile Hydrogel-Wundauflagen auf Glycerinbasis

### Anwendungsgebiete

#### Novogel™ unterstützt erfolgreiches Stillen!

Die runden Pads wurden speziell für die Behandlung von rissigen, wunden und entzündeten Brustwarzen konzipiert.

- Novogel™ wirkt sofort kühlend und schmerzlindernd. Es schützt und polstert die Wunde und reduziert Druck und Reibung.
- Die sterilen Hydrogel-Auflagen wirken nachweislich bakteriostatisch und fungistatisch. Das Risiko von Infektionen wie Soor, Mastitis sowie auch Milchstau wird vermindert.
- Novogel™ fördert eine schnelle Wundheilung. Der hohe Glycerinanteil optimiert den Feuchtigkeitshaushalt der Haut.
- Novogel™ Pads passen sich der Körperform an. Sie sind leicht adhesiv und können unsichtbar unter dem BH getragen werden.
- Novogel™ verklebt nicht mit der Wunde. Es lässt sich einfach und schmerzfrei entfernen.
- Novogel™ kann in Verbindung mit örtlicher Medikation eingesetzt werden.

#### Indikationen (Auszug)

Risswunden  
Schürfwunden  
Bisswunden  
Verbrennungen 1. und 2.(a) Grades  
Infizierte Wunden  
Narbenbehandlung



#### Anwendungshinweise

- Waschen Sie Ihre Hände.
- Nehmen Sie ein Novogel™ Pad aus der Kunststoffschale. Bitte entfernen Sie nicht die textile weiße Schutzlage.
- Legen Sie die Gelseite der Auflage direkt auf die Brustwarze. Novogel™ ist leicht adhäsiv, passt sich der Körperform an und muss unter einem BH nicht zusätzlich fixiert werden.
- Waschen Sie Ihre Hände vor dem Stillen.
- Entfernen Sie das Novogel™ Pad und verwahren es wieder in der Kunststoffschale. Es kann nach dem Stillen wiederverwendet werden. (Novogel™ hat absorbierende Eigenschaften. Je nach Milchverlust in den Stillpausen kann eine Auflage 2-3 Tage oder länger eingesetzt werden)
- Es ist nicht nötig die Brust vor dem Stillen zu reinigen. Die Pads hinterlassen weder Geschmack noch Geruch auf der Haut.
- Für besonderen Kühleffekt können die Pads in einer sauberen Tüte o. Ä. im Kühlschrank aufbewahrt werden.
- Entfernen Sie die Novogel™ pads vor dem Duschen oder Baden.

#### Zusammensetzung

65,0% Glycerin  
17,5% Wasser  
17,5% Polyacrylamide  
(ph-Wert 5,6)

#### Rezeptinformation für den behandelnden Arzt:

Novogel DR-3000  
Hydrogel-Wundauflage rund 7,5 cm, steril  
PZN - 11511904